

Calset

Mode d'emploi



Calset - Mode d'emploi

Généralités

L'appareil Calset est un auxiliaire pratique pour tempérer le composite et les anesthésiques. L'appareil Calset peut être utilisé pour les matériaux en carpules ou en seringues. Un tray (plateau) posé par-dessus la partie chauffante comporte des alvéoles pour les carpules, ainsi qu'une partie centrale pour placer des quantités individuelles de composite. D'autres trays sont disponibles, mentionnés sous «Indications».

Pour la prise du composite, utiliser exclusivement une spatule en plastique afin de ne pas rayer la surface anti-adhérente du plateau.

Lorsque le tray a atteint la température voulue, il peut être retiré de l'élément thermique et placé à un endroit ergonomiquement raisonnable. Le tray sert

Description de l'appareil

Un transformateur à brancher sur le réseau électrique fournit la tension nécessaire.

L'élément thermique rond contient un micro-processeur et le réglage de l'appareil. Du côté extérieur se trouvent le raccordement d'alimentation, un interrupteur et deux témoins LED. L'appareil dispose d'une surface anti-adhérente qui transmet la chaleur au tray. Le tray est muni d'un couvercle et d'un anneau en résine permettant de le saisir sans danger même quand il est chaud. Le Calset s'éteint automatiquement après 10 heures de non-usage.

Mode d'emploi du Calset

Connecter le transformateur au réseau électrique. Connecter la prise d'alimentation en veillant à ce qu'elle soit bien enfoncée dans son logement. Placer le tray choisi sur l'élément thermique. Ci-après, vous trouverez les informations concernant l'interrupteur multi-fonctionnel:

Interrupteur multifonctionnel	Couleur LED	Température
Presser 1 x	vert	37°C
Presser 2 x	orange	54°C
Presser 3 x	rouge	68°C
Presser pendant 2 secondes	-	déclencher

La lampe LED jaune, à côté de l'interrupteur multifonctionnel, s'allume lorsque celui-ci est pressé. Ceci indique que l'appareil est connecté correctement. Après 10 minutes environ, la température désirée est atteinte et la lampe LED cesse de clignoter.

Surchauffe

L'appareil Calset dispose d'un thermostat qui arrête l'appareil lors d'une surchauffe. Les LEDs s'éteignent et l'appareil se refroidit. Quand le thermostat fonctionne à nouveau, le Calset peut être réactivé; s'il s'arrête cependant à nouveau, il doit être renvoyé pour la réparation.

Attention!

Le Calset devient CHAUD. Ne pas toucher les surfaces chaudes. Le couvercle et l'anneau en résine peuvent être manipulés. Quand on enlève le tray de l'élément thermique, il faut l'arrêter pour que la plaque recouverte puisse se refroidir. Ceci se fait en pressant l'interrupteur pendant 2 secondes, jusqu'à ce que le LED jaune s'éteigne.

Désinfection

L'appareil Calset peut être désinfecté pour éviter la contamination croisée. Le tray peut aller dans l'autoclave ou peut être nettoyé avec un chiffon imbibé d'un agent de désinfection. Le boîtier synthétique de l'appareil doit uniquement être nettoyé avec un chiffon et du désinfectant. Ne pas utiliser de spray. **L'élément thermique ne doit pas être stérilisé dans l'autoclave!**

Remarques concernant la désinfection du Dispenser Gun Tray

Pour le nettoyage, enlever la douille en résine et le couvercle. Les deux parties peuvent être désinfectées à froid. Le plateau en métal peut être stérilisé dans l'autoclave ou désinfecté à froid. Pour nettoyer le creux du milieu on peut utiliser un coton-tige imbibé de désinfectant.

Indications

L'élément thermique Calset (appareil de base) est utilisé pour tempérer le composite de manière exacte. Les trays suivants sont disponibles:

Anesthetic Carpule Tray – pour tempérer les carpules d'anesthésique à 37 °C.


Standard Tray – pour 4 carpules de composite ou composite ouvert.

7 Hole Syringe Composite Tray – pour 7 seringues de composite

Porcelain Veneer Tray – pour les veneers en porcelaine

Tri-Tray – pour tempérer du composite dans une seringue d'application (Dispenser Gun) (68°C) et deux instruments. En plus, il peut être utilisé pour tempérer trois carpules. Compatible avec les seringues Caulk, Kerr, SDI et Clinician's Choice.

En plaçant la seringue dans le tray pour le tempérer, veiller à ce que la rainure correspond à l'orifice de la carpule dans la seringue.

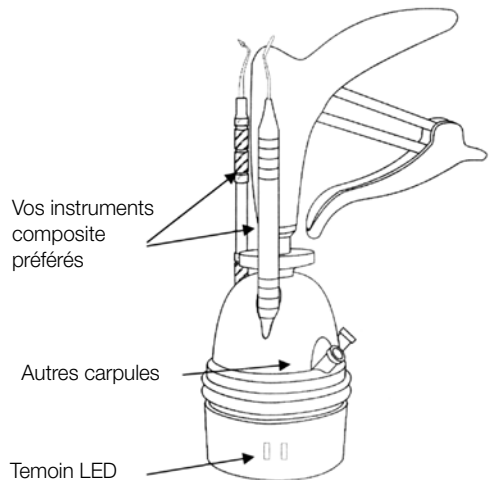

Informations de commande

ADD110008	Calset complet avec Standard Tray
ADD110008-04	Calset complet avec Anesthetic Carpule Tray
ADD110008-12	Calset complet avec Tri-Tray Dispenser pour seringues Caulk, Kerr (original) et Clinician's Choice
ADD110041	Calset complet avec 7 Hole Syringe Composite Tray
	Accessoires (trays uniquement)
ADD600003	Standard Composite Compule Tray
ADD600067	Dispenser Tri-Tray - pour Caulk, Kerr
ADD600064	Syringe Tray - pour 7 seringues de composite
ADD600059	Anesthetic Tray – pour 3 carpules d’anesthésique
ADD600066	Porcelain Veneer Tray

 **Dentaire**

Une vision d'avance en odontologie.

C'Dentaire - Groupe Société Des Cendres

13 rue du Général Mocquery

37550 SAINT-AVERTIN

+33 1 49 61 41 41

commande@sdc-1859.com

www.sdc-1859.com