

VINTAGE Art

Colorants céramiques fluorescents à usage interne ou externe

Les colorants Vintage Art se présentent sous forme de pâtes prêtes à l'emploi. Leur structure hyper fine et leur consistance idéale les rendent vite indispensables. Ils font preuve d'un remarquable pouvoir couvrant tout en restant faciles à appliquer.

Ces colorants sont destinés à la modification des teintes internes et externes sur les céramiques haute fusion. On les utilise également avec la céramique haute fusion montée sur armature alumine ou zircone, avec les lingotins céramiques CAD/CAM, avec la céramique pressée et les dents céramiques artificielles.



AVANTAGES

- Compatibles avec toutes les céramiques à haute fusion
- Colorants en pâte simples à utiliser
- Large gamme de teintes intenses et d'effets colorés
- Pâte de glaçage fluorescente

Indications

- **Céramique pressée sans métal**
Veneers, inlays/onlays, couronnes / bridges
- **CAD/CAM tout céramique**
Disques en feldspath, en alumine et en zircone
- **Céramiques avec ou sans métal**
CET entre 6,0 et 16,0 x 10⁻⁶K⁻¹, cuisson à environ 880 °C

Colorants

- **Base Color Stains**
9 couleurs primaires et secondaires plus des couleurs achromatiques pour ajuster la luminosité
- **Color Stains**
12 effets pour ajuster les teintes individuelles
- **Shade Stains / Foundation Shade Stains**
10 teintes pour maquillage superficiel en fonction du groupe de teintes du teintier



VINTAGE Art - Sets et composants individuels



Basic Color Set

Il comprend toutes les couleurs primaires, les secondaires et les shade stains pour une reproduction naturelle de chaque restauration

- 16 teintes, 3 g chaque : Pink, Yellow, Blue, Orange, Violet, Green, Black, White, Dark Red Brown, Orange Brown, Khaki, A-Shade, B-Shade, C-Shade, D-Shade, R-Shade
- Glazing Paste, 3 g • Vintage Art Stain Liquid, 50 ml • tableau des teintes
- mode d'emploi

Effect Color Set

Colorants individuels et Foundation Shade Stains pour reproduire toute caractérisation dentaire

- 15 teintes, 3 g chaque : Gray, Blue Gray, Corn Yellow, Brown, Black Brown, Mamelon Pink, Mamelon Ivory, Rose Pink, Wine Red, Pink Orange, Foundation A-Shade, Foundation B-Shade, Foundation C-Shade, Foundation D-Shade, Foundation R-Shade
- Glazing Paste, 3 g • Vintage Art Stain Liquid, 50 ml • tableau des teintes
- mode d'emploi

Réf.	Quantité	Produit
6510	1 pce	Vintage Art Basic Color Set
6511	1 pce	Vintage Art Effect Color Set
6513	50 ml	Vintage Art Stain Liquid
6514	3 g	Glazing Paste
6515-6545	3 g	Vintage Art LF teintes individuelles

Teinte	Réf. 3 g
BASE COLOR STAINS	
P (Pink)	6515
Y (Yellow)	6516
Bl (Blue)	6517
O (Orange)	6518
V (Violet)	6519
Gr (Green)	6520
B (Black)	6521
W (White)	6522
G (Gray)	6531

Teinte	Réf. 3 g
COLOR STAINS	
DR-Br (Dark Red Brown)	6523
O-Br (Orange Brown)	6524
Br (Brown)	6534
B-Br (Black Brown)	6535
K (Khaki)	6525
Bl-G (Blue Gray)	6532
CY (Corn Yellow)	6533
MP (Mamelon Pink)	6536
Mlv (Mamelon Ivory)	6537
RP (Rose Pink)	6538
WR (Wine Red)	6539
P-O (Pink Orange)	6540

Teinte	Réf. 3 g
SHADE STAINS	
AS (A-Shade)	6526
BS (B-Shade)	6527
CS (C-Shade)	6528
DS (D-Shade)	6529
RS (R-Shade)	6530
F-AS (Foundation A-Shade)	6541
F-BS (Foundation B-Shade)	6542
F-CS (Foundation C-Shade)	6543
F-DS (Foundation D-Shade)	6544
F-RS (Foundation R-Shade)	6545